



hup DES FORTE M

Alkoholové utierky na dezinfekciu povrchov



Názov produktu

hup DES FORTE M

Oblasť produktu

Dezinfekcia

Popis produktu

Alkoholové utierky na rýchlu dezinfekciu pripravené na okamžité použitie a vhodné na všetky povrchy odolné voči alkoholu. Veľmi dobrá znášanosť s materiálmi a pokožkou. Uvedený na zoznamoch VAH/ÖGHMP. Bez obsahu parfumu. Na rýchlu dezinfekciu aj počas pracovného procesu, napr. v kuchyni, fitnessových štúdiách, v domovoch sociálnej starostlivosti a ambulanciách.

Jednotka balenia

100 obrúskov/balenie

Art.-č. 4450304542

Použitie | Oblasť použitia

Nariadenie o biocídnych výrobkoch: Utierky na alkoholovú rýchlodezinfekciu povrchovo odolných proti alkoholu na okamžité použitie.

Nariadenie EÚ o zdravotníckych pomôckach: Dezinfekcia neinvazívnych zdravotníckych pomôcok odborne vyškoleným personálom.

Použitie: Povrch dôkladne utrite s hup DES FORTE a nechajte pôsobiť. Dbajte pritom na to, aby bol povrch zmáčaný po celej ploche a celý čas zostal navlhčený. Ubezpečte sa, že pred aplikovaním dezinfekcie boli odstránené všetky viditeľné nečistoty.


UDI-DI

00: UDI-DI 09008353219842

55: UDI-DI 09008353219910

Účinné spektrum

Dezinfekcia plôch s mechanikou: baktericídny, levurocídny účinok	VAH/ÖGHMP; EN 13624, EN 13727, EN 16615	1 min. *
Obmedzene virucídna	EN 14476	1 min. *
Obmedzene virucídny PLUS	EN 14476	3 min. **
Adenovírus	EN 14476	3 min. **
Norovírus	EN 14476	1 min. **
Rotavírus	EN 14476	30 s**
Mykobaktericídny	EN 14348	1 min. **

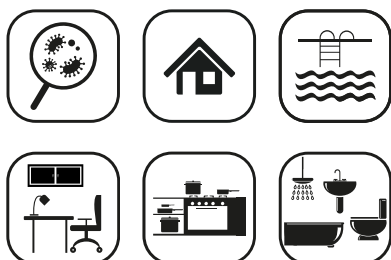



Dezinfekcia

hup DES FORTE M [Medizinprodukt]

Alkoholové utierky na dezinfekciu povrchov

Obmedzene virucídny	EN 16777	1 min. *
Obmedzene virucídny PLUS	EN 16777	5 min. **
Baktericídny/levurocídny	EN 1276, EN 1650, EN 13697	1 min. *

* Vysoké zaťaženie, oblasť medicíny. ** Nízke zaťaženie, oblasť medicíny.

Všetky kontroly pri izbovej teplote.

Materiálová znášateľnosť

Roztok sa neodporúča používať na plexisklo (PMMA).

Veľkosť

V x Š: 20 x 20 cm

Bezpečnostné upozornenie

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. **Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie produktu.** Udržiavajte mimo dosahu detí. Uchovávajte dobre uzatvorené. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Používajte len vizuálne dokonalý tovar.

Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte na chladnom a suchom mieste.

Odporúčanie produktu

Ideálne vhodné na použitie s XIBU 2WIPE hybrid – prvým automatickým dávkovačom vlhčiacich utierok na svete. Patentovaný dávkovač chráni utierky pred vyschnutím a znečistením baktériami. Na povrchy, ktoré sú citlivé na alkohol, odporúčame hup DES PLUS.

Predajná jednotka

Balenie

Europaleta

270 balení

Rev. No. 02 / 06.05.2024